

6. Указания по эксплуатации

6.1 Изделие не предназначено для эксплуатации вне помещения.

6.2 Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с указаниями в руководстве по эксплуатации (паспорт).

6.3 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделия в нормальных условиях не менее 2 часов.

6.4 Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью или салфеткой, смоченными в нейтральных мыльных растворах. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной 0,5 % раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6.5 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий, смазку подвижных соединений и проверку надежности неподвижных соединений. В случае ослабления болтовых соединений необходимо затянуть их ключом.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических условий при соблюдении условий п.4 и п.6

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.

7.3 При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет не менее 5 лет.

7.4 Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

8. Изготовитель и его адрес

ООО ТПП "САЛВЕ"

603053, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Бусыгина, 1

тел.: (831) 253-17-55, (831) 253-05-36

Email:salvenn@yandex.ru

www.salvenn.ru



ПАСПОРТ Кушетка КМС



ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № СДС.ФР.СМ.00201.18
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00166/19
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 10.06.2019г.

1. Назначение и конструкция

1.1 Кушетка предназначена для размещения пациентов при проведении осмотра.

1.2 Кушетка применяется в медицинских и других лечебно-профилактических учреждениях, для эксплуатации внутри помещения.

1.3 Каркас металлический разборный, изготовлен из профильной трубы 25x25 мм, покрытие полимерно-порошковое белого цвета, ложе и подголовник выполнены из ДСП, обитого поролоном и обтянутого винилискожей. Подголовник имеет пять регулировок по высоте. Поставляется в разобранном виде.

2. Основные технические характеристики

Габаритные размеры, мм			Масса изделия, кг
длина	ширина	высота	
1900	600	500	23

- предельные отклонения от габаритных размеров $\pm 5\%$

2.1 Максимальная равномерно-распределенная нагрузка не более **120 кг**.

2.2 Угол наклона подголовника от 0° до 45°

3. Комплект поставки

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Ед. изм.	Кол-во
1	каркас кушетки с ложем и подголовником	шт	1
2	ножки	шт	2
3	крепежные болты с усом оцинкованные М8х65	шт	8
4	шайба плоская оцинкованная D8 мм	шт	8
5	шайба пружинная оцинкованная D8 мм	шт	8
6	гайка М8	шт	8
7	паспорт	шт	1
8	упаковка	шт	1

4. Условия хранения и транспортировки

4.1 Транспортировать изделия в упаковке изготовителя следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

4.2 Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде.

4.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150, но при температурах от минус 20 до плюс 40 °С.

5. Инструкция по сборке Кушетка КМС

Сборку производить на плоской поверхности, для сборки потребуется ключ на 13мм.

5.1 Распаковать компоненты кушетки, проверить комплектность и целостность покрытий поверхностей.

5.2 Положить каркас кушетки с ложем и подголовником (1) на плоскую поверхность мягкой частью вниз, произвести крепление ножек (2) к каркасу при помощи ключа на 13мм и крепежной фурнитуры (3-6)

5.3 Установить кушетку на ножки, проверить затяжку гаек.



1-каркас кушетки с ложем и подголовником
2- ножки